

1 万能型実習「さくら」

1. 腕・脚部はつなぎ目のない一体型で人体に近い可動域です。
2. 独立して座位をとることができます。
3. 上腕・大腿部・臀部の筋肉注射手技が練習できます。
(装着式注射パッドあり)
4. 導尿実習部位は、ワンタッチ接続方法を採用し、使いやすい構造となっています(バルーンカテーテル対応可)。
5. 顎関節が可動し義歯の脱着の練習ができます。



身長:158 cm
体重:18 kg

活用方法の案内

体位変換・移乗・移送



寝衣交換



全身清拭・部分浴



洗髪



人毛かつらを使用
シャンプー・リンス・
ブラッシング OK

義歯のケア



導尿(女性)



バルーンカテーテルも対応可

浣腸・高圧浣腸



腰部の左臀部注射パッド
を取り出して、腰側チュー
ブのジョイントに直腸排水
用ホースジョイントを差し
こんで高圧浣腸の練習が
できる

*カテーテルは 14 号を使用すること。

経管栄養・胃洗浄



胸部を開けると胃の状態が
確認できます

静脈内・皮下・筋肉内注射



専用のパッド
を取り付けると、注射関連
の演習やシミュレーションが
できます

人工肛門のケア



気管切開患者のケア



気管切開部は、内部の気管につながっています

持ち運びには車椅子もしくは
ストレッチャーが必要です。