

2 採血・静脈シミュレータ 『シンジヨーⅡ』



箱の中の物品を確認してください



2本のチューブは
必ず広口びんの中
に入れてください。

模擬血液を入れて
ください。


電源を「ON」にしてください。
通常使用時は「NORMAL」にしてください。
逆血を確認したい場合は「BF」で使用してください。
注)BF 使用後は必ず「NORMAL」に戻してください。

注)同じ色同士接続してください。
白＝白
黒＝黒

ソケットに接続
してください。

「カチッ」と音がします。

腕モデルの接続は白＝黒
になります。

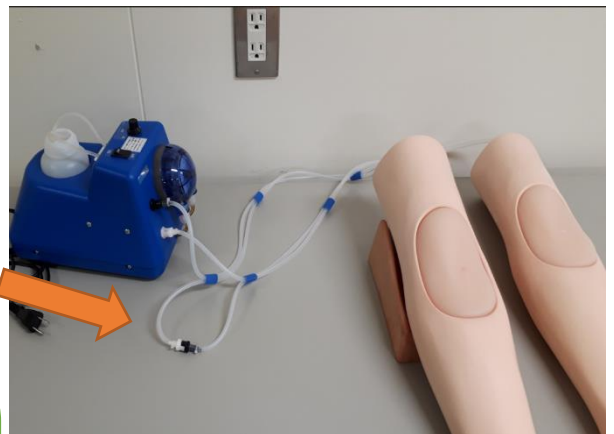

使用後の片付け方法

- ①広口びんを空にしてから、電源を ON にして循環させてください。
- ②チューブ内の血液が排出されたら、水道水を入れて循環させる。
- ③チューブ内の水を全て排出し、腕モデルから注射パッドを外し、完全に乾燥させる。

重いので、ワゴンが必要です。